

弱アルカリ性酵素洗剤

B-クリーン

取り扱い説明書 ご使用上の注意

- ① 本製品は 単体でご使用ください。他の洗剤や漂白剤など他の化学品を混ぜて使用しないでください。
- ② 水・40℃以下のぬるま湯 1ℓに対して 5~10 g を目安に希釈して使用してください。
内視鏡は 5 g を目安に、手術器具は 10 g を目安に 使用してください。
- ③ 容器の中に水分が殆ど無い状態でB-クリーンを投入しますと、成分の一部が固まりますので
作成予定の水溶液量の 10 分の一程度の水量を注水後に本製品を入れて溶かしてください。
- ④ スプレー噴霧で使用する際は 1 分を目安に放置後十分に濯いでください。
- ⑤ スプレーボトルは有効成分のガスが発生する関係で、適宜噴霧するなどガス抜きをしてください。全く使わないで数日間放置すると、液漏れを起こす場合があります。
- ⑥ シンク等に浸漬する際は 3 分程度を目安に放置後十分に濯いでください。
- ⑦ 内視鏡の場合は 10 分以上浸漬しないでください。処置後の内視鏡は直ちに浸漬、すべてのチャンネルに洗浄液を行き渡らせるなど、できるだけ早く有機物と洗浄成分を触れさせることが、次の高水準消毒剤を有効に生かすコツです。
- ⑧ 使用、未使用に限らず、当日溶かした溶液は翌日に持ち越さないで廃棄してください。
廃棄の際は水道水を流しながら廃液してください。
- ⑨ 使用前に必ず SDS (安全データシート) をご参照の上で保護手袋やゴーグルなど装備面、
また換気、環境面などご理解の上で使用してください。
皮膚：繰り返し何度も接触すると皮膚炎（赤ざれ、ひび割れ）の原因になります。
体内摂取：吸引したり、飲用した場合に有害となる場合があります。
眼：軽い充血や目のかゆみ、涙目を起こす場合があります。
応急措置は SDS をご参照ください。